

COVID-19

(NOUVEAU CORONAVIRUS)

Équipement de protection individuelle - Gants

Formation sur l'utilisation, l'inspection et l'élimination appropriées des gants de protection à usage unique

Contexte

Le document suivant fournit aux employés et aux gestionnaires ou aux superviseurs immédiats de l'information sur la fourniture, la sélection, les soins et l'élimination liés à l'utilisation des gants comme équipement de protection individuelle (EPI) pendant la pandémie de COVID-19.

Sélection de gants de protection individuelle

Les employés qui assument des fonctions particulières recevront des **gants médicaux non poudrés à usage unique (p. ex. en latex ou en nitrile sans latex pour les employés ayant des allergies)**.

Exigences obligatoires

Les gestionnaires ou les superviseurs immédiats doivent :

- s'assurer que les employés (et eux-mêmes) s'inscrivent dans SABA pour suivre la formation et réviser les procédures (Technique d'enfilage et de retrait des gants de protection à usage unique - code de cours: 0000104488) ;
- recommander aux employés d'imprimer la procédure de formation à partir d'[iService](#) comme aide-mémoire ;
- s'assurer que les employés jettent leurs gants dans une poubelle doublée d'un sac jetable, de n'importe quel type, facilement accessible ;
- s'assurer qu'une quantité suffisante de gants est à la disposition des employés.

Les employés doivent :

- suivre la formation sur SABA. Le système assurera le suivi de la formation. (Technique d'enfilage et de retrait des gants de protection à usage unique - code de cours: 0000104488).
- porter tout l'EPI fourni par la direction ;
- s'adresser à leur gestionnaire s'ils ont des préoccupations par rapport à l'utilisation de cette pièce de l'EPI (p. ex. allergie au latex) ;
- inspecter leur EPI pour déceler des marques d'usure et des déchirures (trou, contamination, sale) et le remplacer au besoin ;
- éliminer les gants dans n'importe quel type de poubelle doublée d'un sac.

Utilisation appropriée des gants à usage unique

- Suivre les étapes afin d'enfiler et de retirer adéquatement les gants à usage unique (voir la section Apprendre la technique plus bas).
- Toujours se laver les mains avant d'enfiler les gants et après les avoir retirés.
- Les gants de protection à usage unique ne doivent pas être décontaminés ou réutilisés.
- Des changements fréquents de gants sont requis au cours d'une journée de travail :
 - changez vos gants en tout temps si vous devez vous laver les mains (p. ex. pendant les pauses, avant et après avoir mangé);
 - lorsque les gants sont compromis (p. ex. percés, contaminés);
 - lorsque les mains ont trop transpiré.
- L'utilisation de lotion pour les mains à base de pétrole peut avoir un effet négatif sur l'intégrité des gants de latex.

Précautions de sécurité générales

- Même avec des gants, il est important de suivre les mesures d'hygiène recommandées afin de réduire le risque d'infection,
 - Bien se laver les mains avec de l'eau tiède et du savon pendant au moins 20 secondes ou utiliser un désinfectant à main à base d'alcool s'il n'y a pas d'eau et de savon facilement accessibles;
 - Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche avant de s'être lavé les mains;
 - Respecter les précautions à prendre en cas de toux et d'éternuement, c'est-à-dire se couvrir la bouche et le nez avec son bras ou un mouchoir afin de réduire la propagation des germes. Se rappeler de jeter le plus rapidement possible un mouchoir après l'avoir utilisé et se laver les mains de nouveau;
- Les mesures supplémentaires pour améliorer le nettoyage et la désinfection des surfaces sont toujours de mise même si des gants sont fournis.

Apprendre la technique

Veillez revoir attentivement la figure qui suit et qui présente la technique appropriée pour enfiler et retirer des gants de protection à usage unique.

Si vous avez des questions après avoir vu la technique, veuillez consulter votre gestionnaire **avant** d'utiliser l'équipement.

Lorsqu'une indication de l'hygiène des mains se présente avant un contact nécessitant l'usage de gants, pratiquer l'hygiène des mains par friction hydro-alcoolique ou lavage au savon et à l'eau.

I. COMMENT ENFILER LES GANTS



1. Prélever un gant de soins de son emballage d'origine.



2. Ne toucher qu'une surface limitée du gant correspondant au poignet (bord supérieur du gant).



3. Enfiler le premier gant.



4. Prélever un second gant avec la main non gantée et ne toucher qu'une surface limitée du second gant, correspondant au poignet.



5. Afin de ne pas toucher la peau de l'avant-bras avec la main gantée, retourner la surface externe du gant à enfiler sur les doigts repliés de la main gantée, permettant ainsi d'enfiler le gant sur la seconde main.




6. Une fois les gants enfilés, les mains ne touchent rien d'autre que ce qui est défini par les indications et les conditions d'usage des gants.


II. COMMENT RETIRER LES GANTS



1. Pincer un gant au niveau du poignet afin de le retirer sans toucher la peau de l'avant-bras, en le retournant sur la main, de façon à ce que la surface interne se retrouve à l'extérieur.

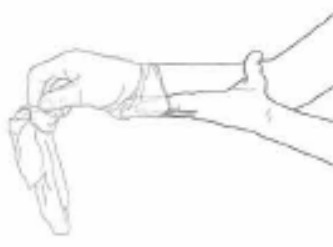

2. Tenir le gant retiré dans la main gantée et glisser les doigts de la main dégantée entre le gant et le poignet de l'autre main. Retourner le gant depuis l'intérieur sur la main de façon à ce que la surface interne se retrouve à l'extérieur, tout en enveloppant le gant déjà retiré.

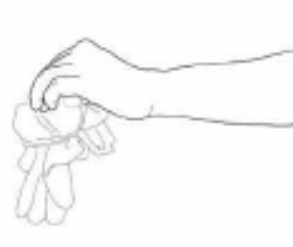

3. Jeter les gants usagés.

4. Pratiquer l'hygiène des mains par friction hydro-alcoolique ou lavage au savon et à l'eau.